

仕様

| | | |
|---------------|--|--------------------------------|
| 販売名 | ファミリーメディカルチェアI.S FMC-8000 | |
| 使用電源 | AC100V | |
| 定格消費電力 | 148W (椅子120W オットマン28W) | |
| 定格周波数 | 50-60Hz | |
| 定格時間 | 30分 | |
| 上半身 | もみ速さ | 5段階 最小約12回/分、最大約33回/分 |
| | たたき速さ | 5段階 最小約280回/分、最大約600回/分 |
| | もみ玉の幅 | 3段階 狭・中・広 |
| | 上下移動速さ | 約20秒で1往復 |
| | マッサージ範囲 | 約70cm (部分ローラーのとき約15cmの範囲で自動反復) |
| 座揺れ速さ | 約36回/分 (座ゆらぎ動作時) | |
| 自動コース | メディカルコース:4種類 快適コース:4種類 | |
| 自由選択コース | 14種類 (一部自動指圧点検索機能付き) | |
| バイブレーター機能 | 背:1種類 | |
| エアーマッサージ | エア圧力 約40kPa | |
| オートタイマー | 約15分 (自動コース時は異なります) | |
| リクライニング角度 | 水平面に対して約120°~約170°無段階 (電動リクライニング) | |
| 本体の寸法 | 椅子 幅約83cm×奥行約100 (130) cm×高さ約110 (60) cm ()内の数字は最大リクライニング時 | |
| | オットマン 幅約69cm×奥行約36cm×高さ約58 (49) cm ()内の数字はスツール状態での水平時の高さ | |
| 重量 | 約82kg (椅子約67kg オットマン約15kg) | |
| 外装布地 | 合成皮革 (抗菌・防汚加工) | |
| 付属品 | 電源コード・枕(大)・枕(小)・アース線・緩衝パッド(厚)・緩衝パッド(薄)・指圧パッド(4個) | |
| 包装 | 2梱包/1台 | |
| 類別 | 機械器具 (77) バイブレーター | |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード34662000) 管理医療機器 | |
| 医療機器製造販売業許可番号 | 31B2X00003 | |
| 製造販売元 | ファミリー株式会社 鳥取県西伯郡大山町高田1220番地 TEL. (0859) 54-4911 (代) | |
| 製造元 | ファミリー株式会社 | |

ファミリー株式会社 サービスセンター

受付時間 土・日・祝を除く平日 9:00~17:00

全国共通フリーダイヤル

☎ 0120-772-294

| | | |
|--------|--|-------------------------|
| 札幌営業所 | 〒060-0006 札幌市中央区北6条西18丁目1-17 (メタスタジオ1階) | TEL. (011) 640-6655 (代) |
| 仙台営業所 | 〒984-0047 仙台市若林区木ノ下3丁目1-2 | TEL. (022) 291-3484 (代) |
| 東京支店 | 〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目16-14 (武蔵館ビル4階) | TEL. (03) 3392-7100 (代) |
| 名古屋営業所 | 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目35-18 (一光大須ビル1階) | TEL. (052) 223-1641 (代) |
| 大阪支店 | 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2丁目1-3 (ソーラ新大阪21 14階) | TEL. (06) 4807-9191 (代) |
| 広島営業所 | 〒733-0033 広島市西区観音本町1丁目21-5 | TEL. (082) 231-0227 (代) |
| 福岡営業所 | 〒810-0071 福岡市中央区那ノ津2丁目6-4 (九産ビル3階) | TEL. (092) 711-1567 (代) |


2007年5月24日 (第1版) 772252000

FAMILY MEDICAL CHAIR I.S

FMC-8000
ファミリーメディカルチェア I.S



このたびは、ファミリーメディカルチェアI.Sをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この製品は、疲労の回復・改善を目的としたさまざまなマッサージがお楽しみいただけます。
皆様の日々の健康管理の良きパートナーとして末永くご愛用ください。

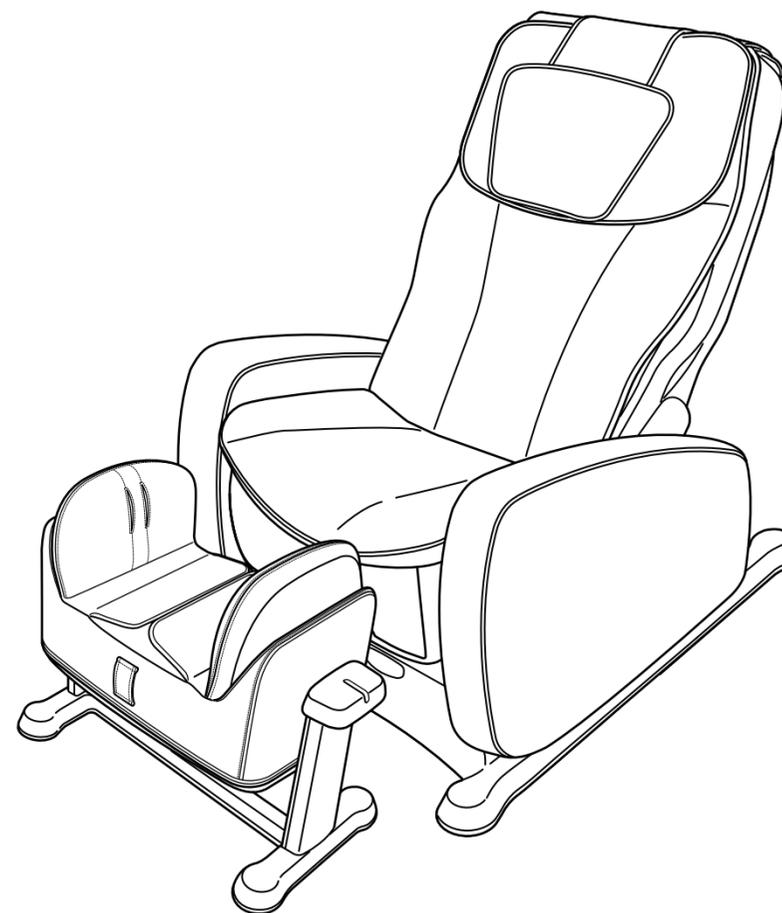

もくじ

| | |
|-------------------------------|-----|
| ■安全上のご注意 | 1 |
| ■おもな特長と効能・効果 | 4 |
| ■各部の名前とはたらき | 5 |
| ■ご使用前に | 11 |
| ■椅子の調節 | 14 |
| ■オットマンの調節 | 16 |
| ■コースの種類と特長 | 17 |
| ■自動コース | 19 |
| ■自由選択コース | 21 |
| ■オットマンマッサージ | 25 |
| ■故障かな?と思ったら | 26 |
| ■Q&A 使い終わったら | 28 |
| ■保管とお手入れの仕方 | 29 |
| ■アフターサービスについて 安全のために商品の点検を | 30 |
| ■仕様 サービスセンター | 裏表紙 |

ご使用前には、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

日本国内専用 (この製品に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。よってこの製品を) (国外に持ち出した場合、保証及び修理対応はできませんのでご了承ください。)

JAPANESE EQUIPMENT SPECIFICATION WARRANTY APPLIES ONLY IN JAPAN.
WARRANTY INCLUDING REPAIRS BY THE MANUFACTURER DOES NOT APPLY IF THE CHAIR IS TAKEN OUT OF JAPAN.

- ◎「取扱説明書」は、いつでも見られるように大切に保管してください。
- ◎保証書は、お買い上げの際必ずお受け取りの上、「取扱説明書」とともに大切に保管してください。
- ◎この製品は、部品調達および部品組立てを中国にある弊社工場で行っており、日本国内の弊社工場にて企画/開発/設計から最終組立て、および品質保証を行っております。
- ◎この製品は、一般家庭用として設計されていますので、一般家庭用以外 (業務用など) でご使用の場合は、お買い上げの販売店またはサービスセンターにご相談ください。

取扱説明書

保証書別途添付



安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。なお、各部の名前については5～10ページをご覧ください。

表示の種類と意味



| | |
|---|--|
|  | 警告 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が想定される場合。 |
|  | 注意 誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される場合。 |

図記号の種類と意味

| | |
|---|--|
|  |  記号は、禁止の行為であることを示しています。(左図の場合は分解禁止) |
|  |  記号は、行為を強制したり指示したりするものです。(左図の場合は電源プラグを抜く) |

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

ご使用場所の注意点
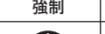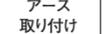
| | |
|---|----------------|
|  | 注意 |
|  | 禁止 |
|  | 強制 |
|  | アース取り付け |
|  | 禁止 |
|  | 禁止 |
|  | 禁止 |
|  | 禁止 |
|  | 禁止 |
|  | 禁止 |


ご使用前の注意点

| | |
|---|-----------|
|  | 警告 |
|  | 禁止 |
|  | 強制 |
|  | 禁止 |

【安全上のご注意】

【安全上のご注意】

ご使用前の注意点
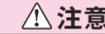
| | |
|---|-----------|
|  | 注意 |
|  | 強制 |
|  | 禁止 |

ご使用時の注意点

| | |
|---|-----------|
|  | 警告 |
|  | 禁止 |
|  | 強制 |

注意

| | |
|---|-----------|
|  | 禁止 |
|---|-----------|

安全上のご注意

ご使用時の注意点

| | |
|---------------|---|
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ● 緊急時や動作中に異常を感じたときは、リモコンの[急停止]ボタンを押して、動作を停止させてください。オットマンの動作が停止しない場合は、オットマンの操作器の[急停止]ボタンを押して動作を停止させてください。 ● 使用中に体に激しい痛みや異常を感じたときは、ただちに使用を中止し医師に相談してください。 ● マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。 →強い刺激のままで使用を続けるとケガのおそれがあります。 ● 背パッドをはずしてマッサージしないでください。 →ケガの原因になります。 ● マッサージ中は眠らないように注意してください。 →ケガの原因になります。 ● マッサージは、1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。 →長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。1日当たりのマッサージは、通算30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。 |
| 強制 | <ul style="list-style-type: none"> ● 停電のとき、または停電の可能性があるときはただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →停電復帰時、事故やケガのおそれがあります。 ● 落雷の可能性があるときは、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ● 動かない場合や異常を感じたときは、事故防止のため、ただちに使用を中止して主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、サービスセンター(裏表紙に記載)に点検・修理を依頼してください。 →感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。 |
| プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。 ● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ● ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。 |

ご使用後や使用しないときの注意点

| | |
|---------------|--|
| 注意 | <ul style="list-style-type: none"> ● 使用後は必ず主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 →お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。 ● 本機を使用後は、必ず背もたれを完全に起こしてください。 ● 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。 ● 座、背もたれ、オットマンに物を載せないでください。 |
| 強制 | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。 ● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ● ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。 |
| プラグを抜く | <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。 →感電やショートによる火災の原因になります。 ● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 ● ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 →ホコリや湿気で絶縁劣化し、感電や漏電・火災の原因になります。 |

その他の注意点

| | |
|-------------|--|
| 警告 | <ul style="list-style-type: none"> ● 本体の上に立たないでください。座部やオットマン以外に座るなどして、上から強い衝撃を与えないでください。 →転倒による事故やケガ、故障の原因になります。 ● 制御ボックスの上ののったり、物を置いたりしないでください。 |
| 禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ● 改造はしないでください。また、サービスマン以外の人は分解・修理をしないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。修理はサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。 ● 電源コードが破損した場合、危険ですのでコードの交換はサービスセンター(裏表紙に記載)に依頼してください。 |
| 分解禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ● 改造はしないでください。また、サービスマン以外の人は分解・修理をしないでください。 →火災や感電、ケガの原因になります。修理はサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。 ● 電源コードが破損した場合、危険ですのでコードの交換はサービスセンター(裏表紙に記載)に依頼してください。 |

注意

| | |
|-----------|---|
| 強制 | <ul style="list-style-type: none"> ● 他の人に譲渡、貸与するときは、本体とともにこの取扱説明書を必ずお渡しください。 |
|-----------|---|

※製品を廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

おもな特長と効能・効果

特長

もみ玉、エアー、パイプを組み合わせたハイブリッドマッサージ機能

あらゆる技術を投入したマッサージ機能により、心地よいリラクセスを実現しました。

バリエーション豊富なマッサージ技術と独自のプログラムで人の手に近い感覚のマッサージを行います。きめ細かいマッサージで背部、及び座部をしっかりほぐします。脚部はオットマンのエアーセルにより足裏からふくらはぎまで心地よいマッサージを行うことができます。

光センサーによる自動指圧点検索機能

マッサージ前に、その人の体型に応じて指圧点を自動的に検索。体型や目的に合わせて効果的なマッサージが行なえるようになっています。

バイブレーター機能

背にバイブレーター機能を内蔵。心地よい振動で疲れをほぐします。

わかりやすいガイドメッセージ表示部付きリモコン

リモコンにはくっきりと見やすい電光掲示機能の表示部を採用。マッサージ動作への誘導を行い、実行中の動作内容の説明などをわかりやすく確認できるようになっています。

心地よい姿勢を簡単調節できる電動リクライニング機能

背もたれの角度を床面に対して約120°～約170°の範囲内で、お好みの角度に調節できます。

オットマン角度調節機能

オットマンをマッサージャーとして使用する場合は3段階、スツールとして使用する場合は2段階に調節できます。

技法にこだわった多彩なコース機能

目的に合わせて最適なコースが選べるメディカルコースと快適コース、お好みで組み合わせることができる自由選択コースをご用意しました。

身体ストレッチ機能

背中と座部にあるエアーセルが連動して身体をひねる動作を行います。

座ゆらぎ機能

座面が約40mm左右に揺れることで、心地良いリズムでリラクセスすることができます。

強弱メカ

エアーバッグでメカの押し出し量が調節でき、もみ味の強弱がコントロールできます。

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- 血行をよくする
- 筋肉のこりをほぐす


各部の名前とはたらき

椅子

【各部の名前とはたらき】




【各部の名前とはたらき】

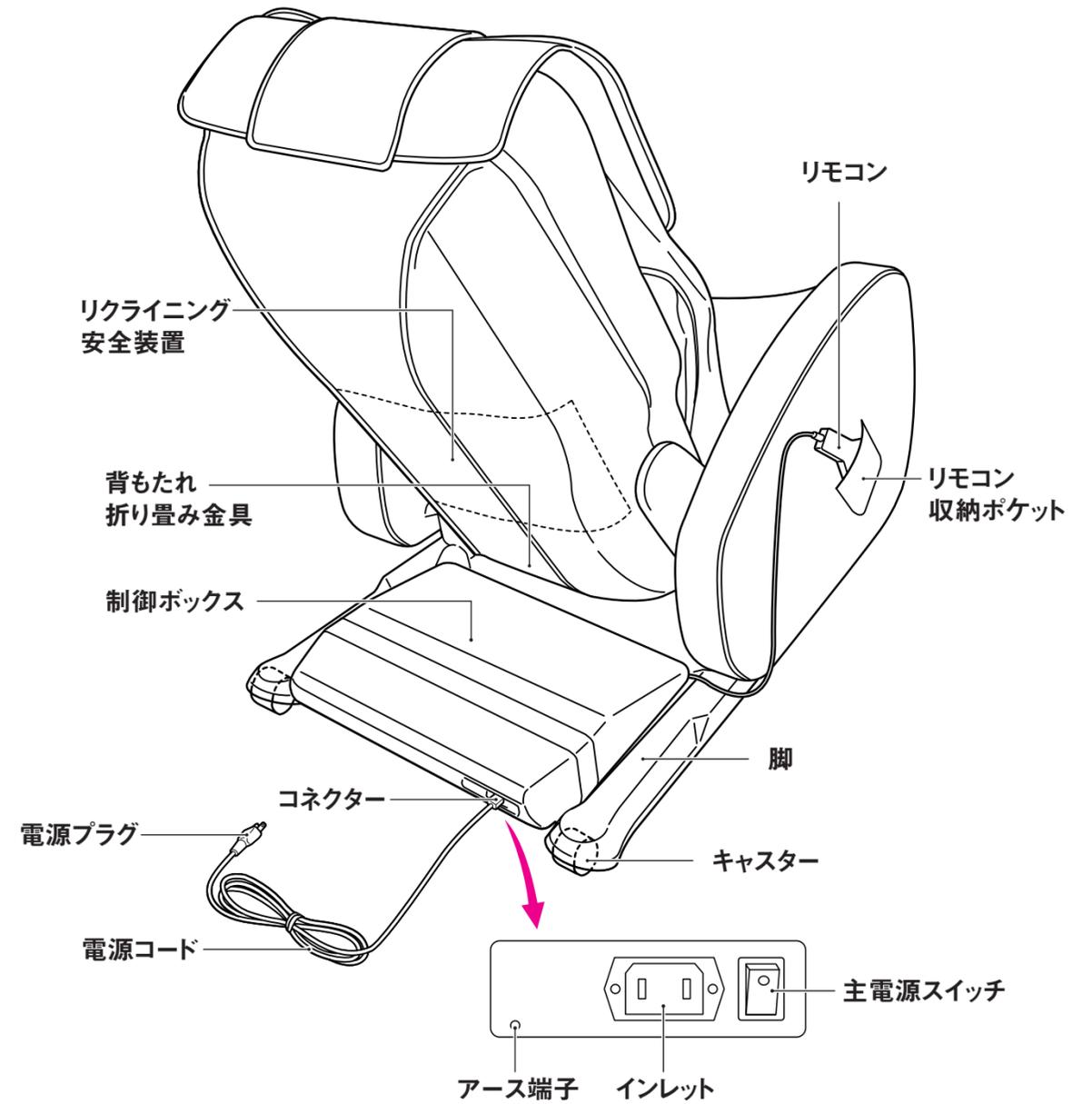

各部の名前とはたらき

リモコン

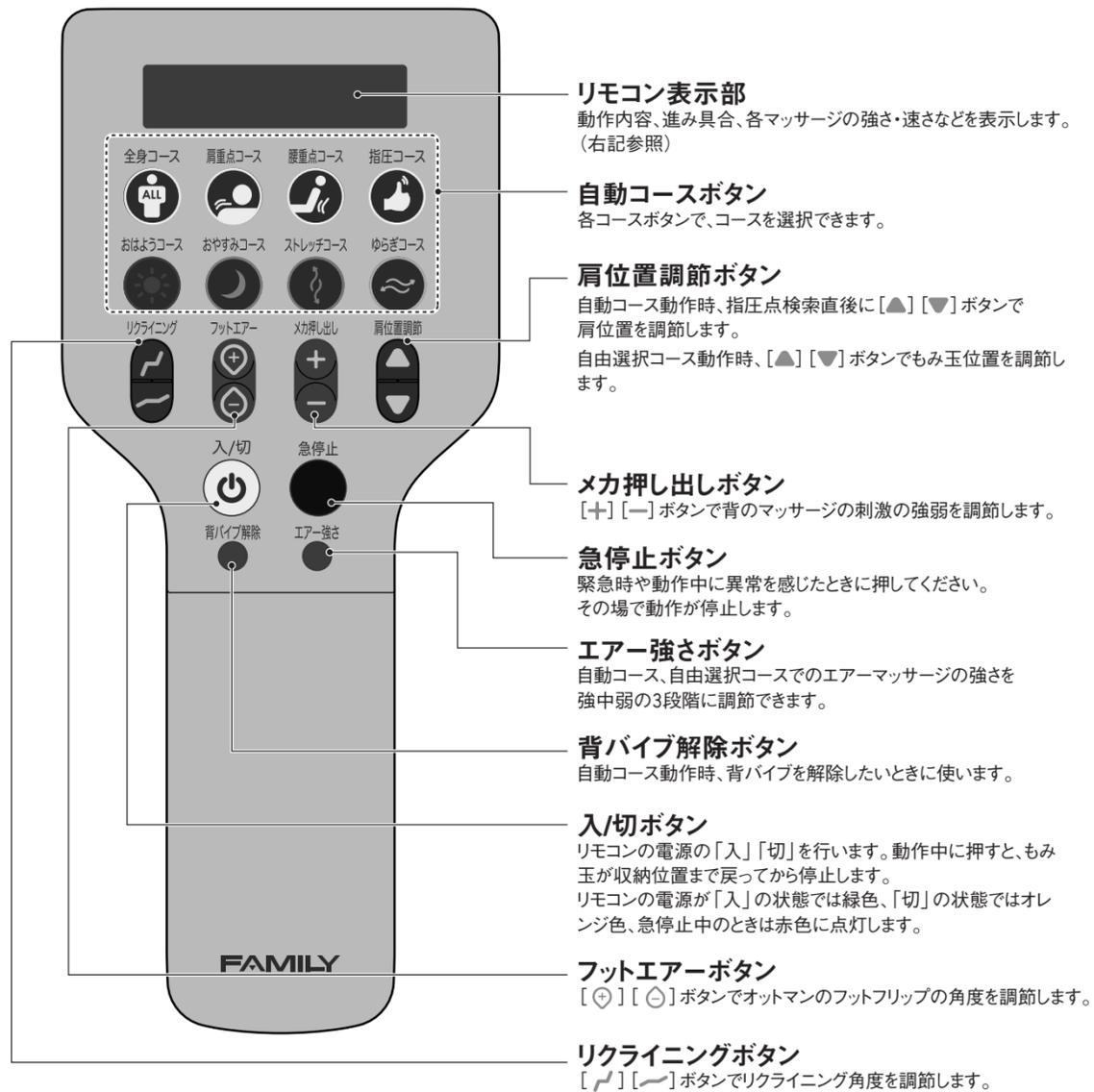

【各部の名前とはたらき】



- 警告**
- リモコンに水などをこぼさないでください。
 - ぬれた手で操作しないでください。

- リモコンの上に座ったり、リモコンを落したり、踏んだり、リモコンのコードを強く引っ張ったりしないでください。
- 先のとがったものやかたいものでリモコン表示部やボタンを押さないでください。
→破損の原因になります。

リモコン/表示部について


動作内容、進み具合、各マッサージの強さ・速さなどを文字またはイラストで表示します。
文字・イラストは表示部の右から左に向かって流れます。

例) 自動指圧点検索動作時に流れる文字
「指圧点検索中!」

リモコン表示部




リモコン/扉内部

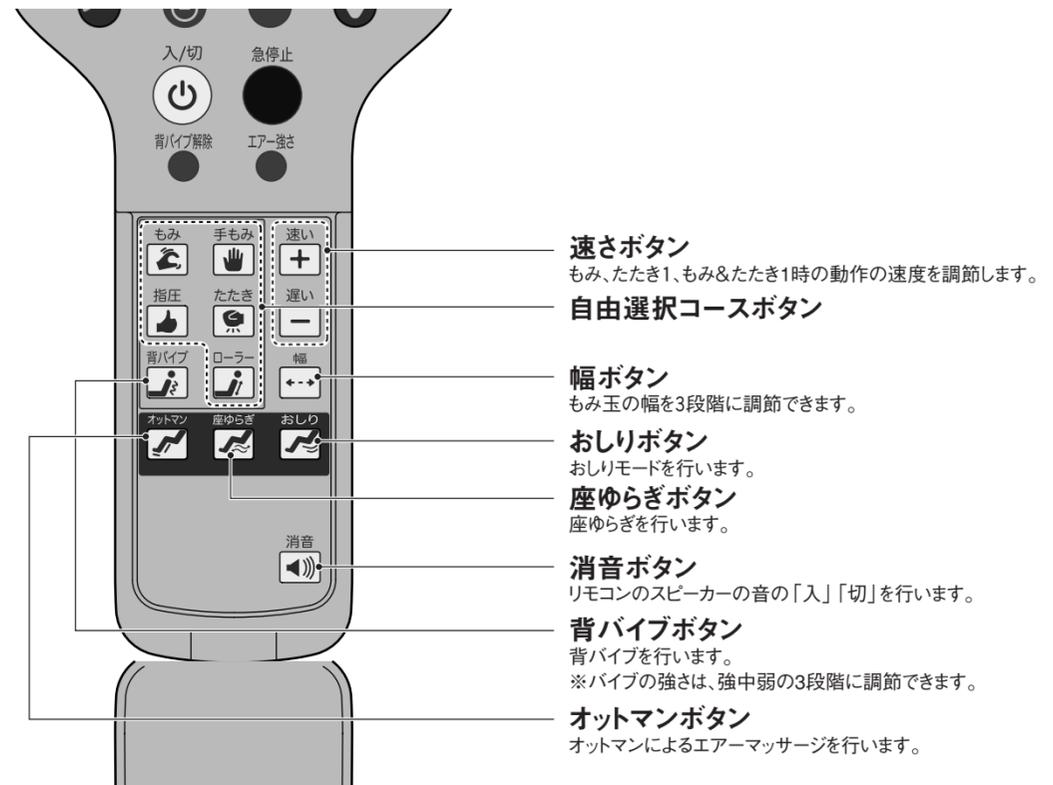

【各部の名前とはたらき】


各部の名前とはたらき

オットマン

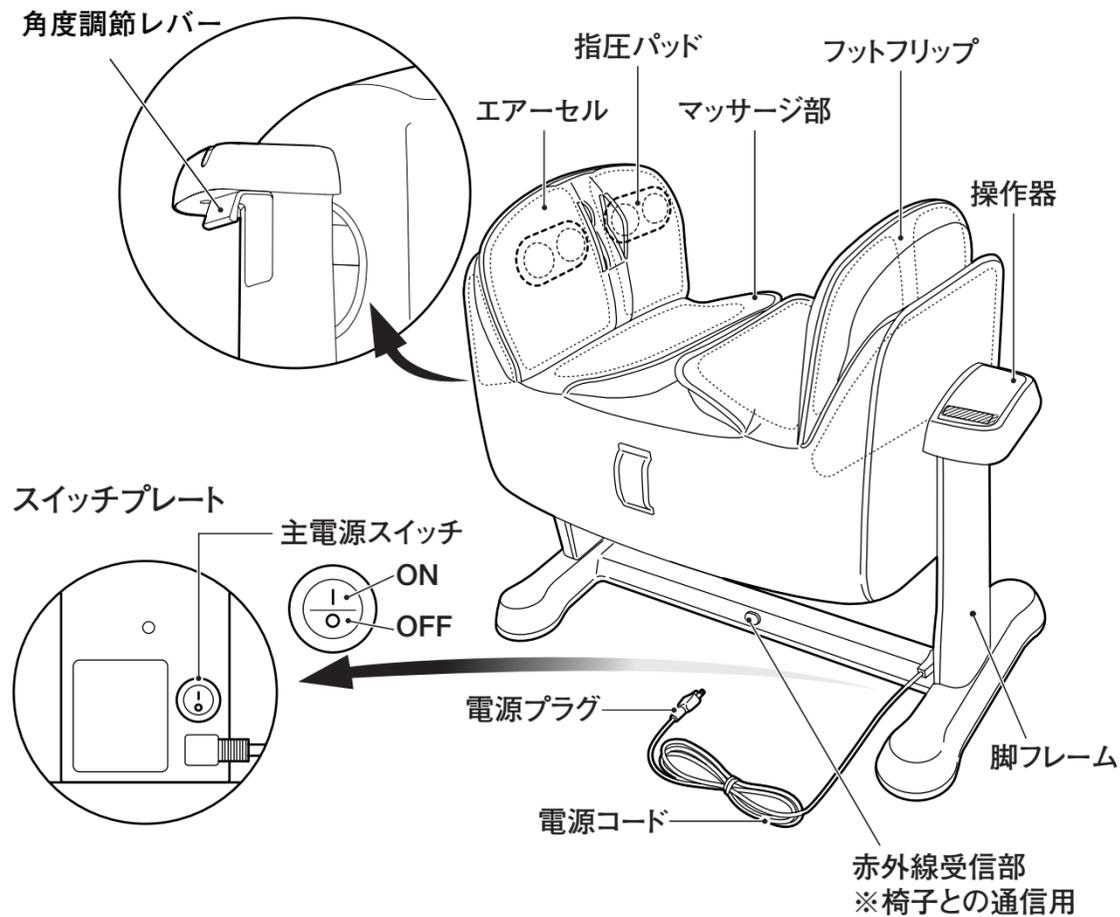

【各部の名前とはたらき】

操作器

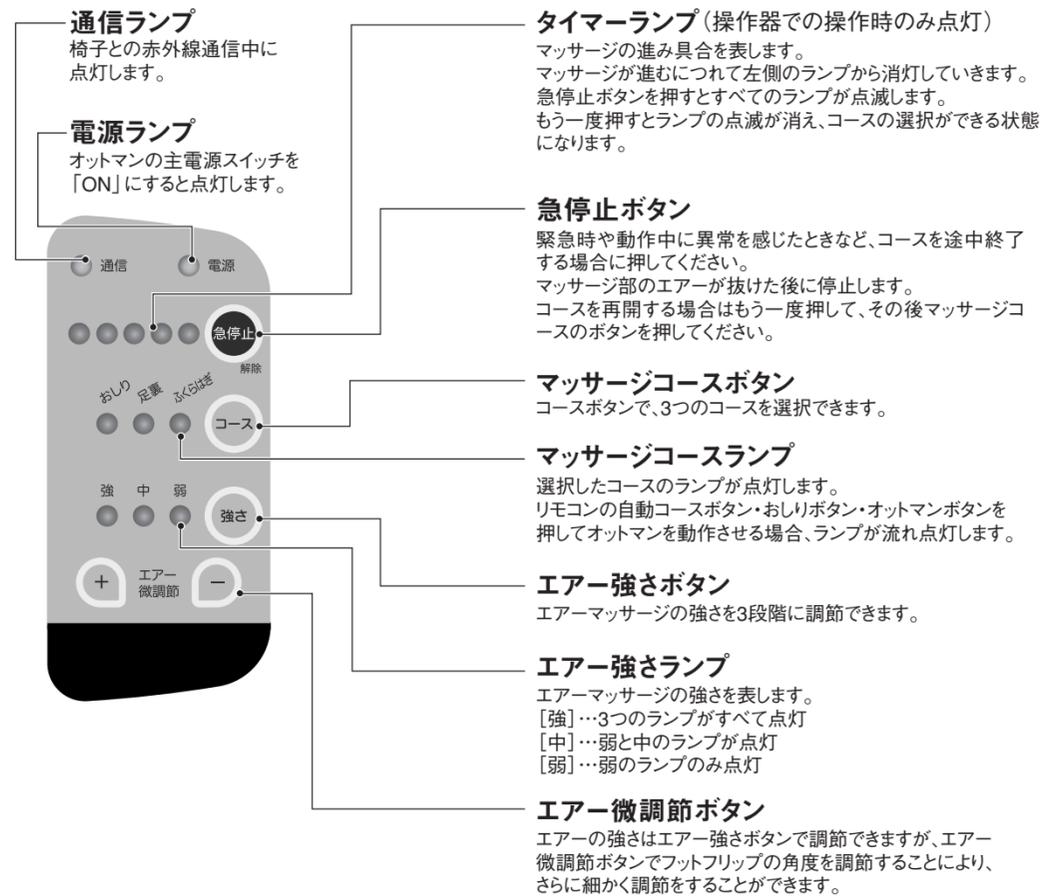

【各部の名前とはたらき】



警告

- 操作器に水などをこぼさないでください。
- ぬれた手で操作しないでください。

- 先のとがったものやかたいもので操作器のボタンを押さないでください。
→破損の原因になります。

ご使用の前に

- この製品は、背もたれが折り畳まれた状態で梱包してお届けしています。ご使用前には、必ず背もたれをカチッと音がするところまで起こしてください。
- 冷えきった室内の温度を上げて使用するときは、室温を急に上げず、徐々に上げてください。本機を冷えきった状態のまま暖かい室内に持ち込んだときは、1時間ほど待ってから使用してください。
→動作部に露が生じ、性能を十分発揮できなくなることがあります。

設置場所について

リクライニングをしたときに壁や物に当たらないように、椅子の後ろのスペースは50cm以上確保してください。


- 椅子の赤外線送信部がオットマンの赤外線受信部と向かい合うように設置してください。
- 椅子とオットマンとの間に物などを置かないでください。

注意

- 浴室やサウナなど、湿気が多い場所では使用しないでください。
- 床面が水平な場所に置いて使用してください。
- ゴミやホコリの多い場所、または周囲温度が高い場所(40℃以上)では使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所やストーブの近くなど、直接高温になる場所に設置しないでください。

物を置かないでください。
(赤外線通信ができなくなります。)

50cm以上

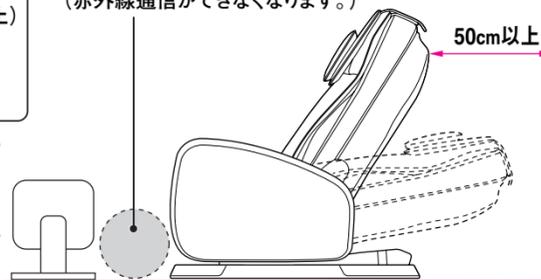


- 床面の傷つき防止や運転中の音をやわらげるためにも本体下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペットは敷かないでください。)
- 重量物ですので、下ろすとき床面を傷つけないように注意してください。
- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。
- 体重100kgの人が座った状態で1cm²あたり約3.8kgの荷重がかかります。(オットマン部分はそのぞく)

アースの取り付け方

万一の感電防止のために、椅子はアース線を取り付けてください。


- ①電源コンセントにアース端子がある場合
椅子後部にあるアース端子のネジに付属のアース線を接続し、他端部の先端の皮をむき、電源コンセントのアース端子に確実に接続してください。アースがはずれたり、端子がゆるんでいないか、ときどき点検してください。
- ②電源コンセントにアース端子がない場合
お買い上げの販売店にご相談ください。

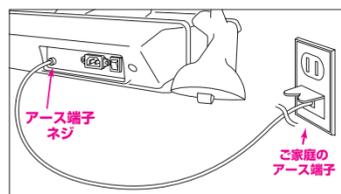


主電源の入れ方

椅子

- ①電源コードのコネクターを椅子後部のインレットに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

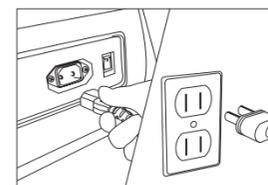


- ②椅子後部の主電源スイッチを「ON」にします。このとき、リモコン表示部に文字が表示されます。

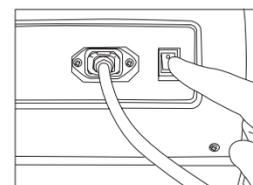


※もみ玉が途中で止まっているとき主電源スイッチを「ON」にすると、もみ玉は自動的に収納位置(背もたれ上部)まで移動して停止します。また、座面も初期位置調整のため一度動いてから停止します。

オットマン

- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。

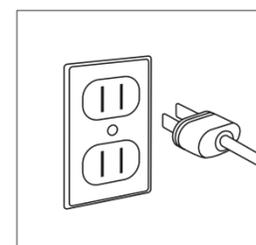

- ②脚フレーム内側の主電源スイッチを「ON」にします。

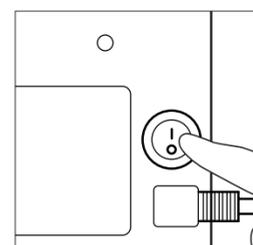


- 警告** ●変圧器を用いた使用はしないでください。
→故障や感電の原因になります。

- 注意** ●電源プラグをコンセントに差し込む前に、主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
●電源プラグおよびコネクターは確実に最後まで差し込んでください。
●ご使用の際にはこの取扱説明書にしたがい全てのスイッチを順次入れ、機器が正常に動作することをお確かめください。

布地の確認

図のように、背パッドを上げて、本体の布地が破れていないか確認してください。また、背エアセルを裏返して、その他の部分に布地の破れがないかどうか確認してください。

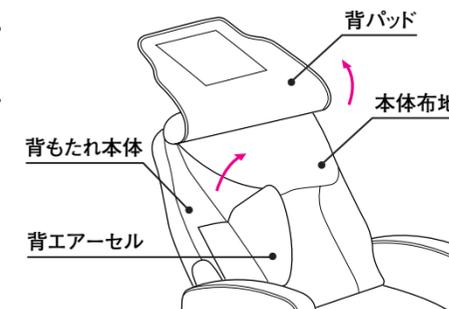

- 警告** ●ご使用前には必ず背パッドを上げて、本体の布地が破れていないか確認してください。また、その他の部分に布地の破れがないことを確認してください。どんな小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、サービスセンター(裏表紙に記載)にご連絡ください。

ご使用の前に

移動の仕方


椅子

脚部に移動用キャスターがついています。背もたれを起し、主電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてから図のように椅子前端的指かり部分(P5参照)を持ち、前側を浮かせてキャスターで移動してください。



オットマン

主電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてから図のように取手を持ち移動してください。

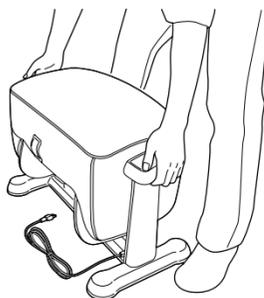


注意

- 人をのせたまま移動させないでください。
- 移動の際には足などはさまないように十分注意してください。

背もたれの折り畳み方

背もたれ折り畳み金具を上へあげて、背もたれをコンパクトに折り畳めます。

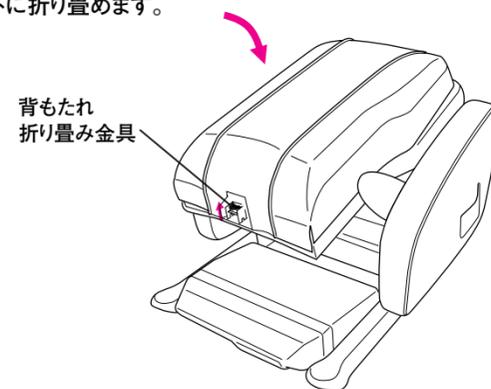

椅子の調節

椅子への座り方

もみ玉は通常、背もたれの上部に左右に広がって引っ込んだ状態になっています(収納状態)。安全のため、もみ玉の位置を確認し、上記以外の場所にもみ玉がある場合は、すぐに座らず、主電源スイッチを入れてもみ玉を収納状態に戻してから、ゆっくりと椅子の中央に座ってください。

注意

- ご使用前は背もたれを完全に起し、体調に応じてリクライニング角度を調節し、はじめは弱い刺激でマッサージしてください。

リクライニングの使い方

■背もたれを起こす場合

リクライニングボタンの[]を押してください。お好みの角度で、ボタンから指をはなしてください。ボタンを押し続けると、背もたれが上がりきります。


■背もたれを倒す場合

リクライニングボタンの[]を押してください。お好みの角度で、ボタンから指をはなしてください。ボタンを押し続けると、背もたれが下がりきります。

- 椅子後部の主電源スイッチが「ON」になっていれば、リクライニングの上下調節がご使用になれます。

警告

- 背もたれを倒すときは、必ず周囲に人(特にお子様)やペットがいないことを確認してください。また、背もたれの後ろに体や物をはさまないようにしてください。

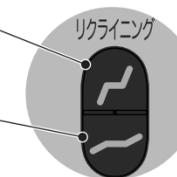


枕(小)の使い方

本機には大小2つの枕がついています。この2つの枕によってマッサージ中に頭を楽に、自然な位置にすることができます。


- 枕(小)は裏側についているマジックテープで位置の調節ができます。あらかじめ、頭の高さに合わせておいてからマッサージを行ってください。

- 枕(小)は正しい位置でご使用ください。枕の位置によっては、自動指圧点検索がうまくいかない場合があります。

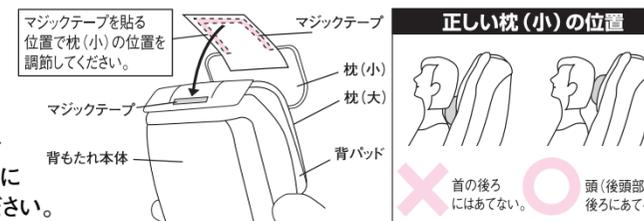

緩衝パッドの使い方

背パッドの裏には緩衝パッド(厚)が入っています。マッサージが弱いと感じられる場合は同梱の緩衝パッド(薄)に入れ換えるか、緩衝パッドを抜き取ってマッサージを行ってください。

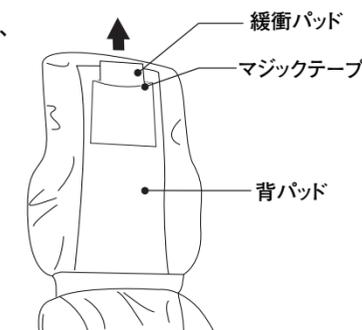


椅子の調節


背エアースルの位置調節の仕方

背もたれには背エアースルが左右についています。
背エアースルはファスナーをつなぐ位置によって幅を調節することができます。
●ファスナーは左右3箇所ずつあるのでお好みに合わせてつけ替えてマッサージを行ってください。


①図のように背パッドを上げます。

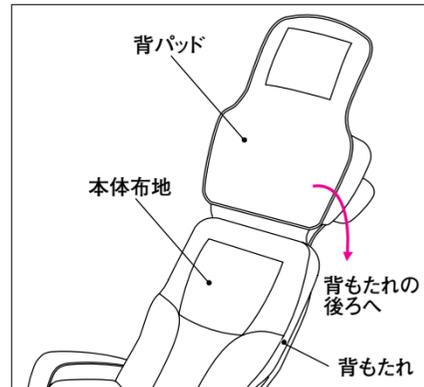


②背エアースルの上にある布をマジックテープからはがします。

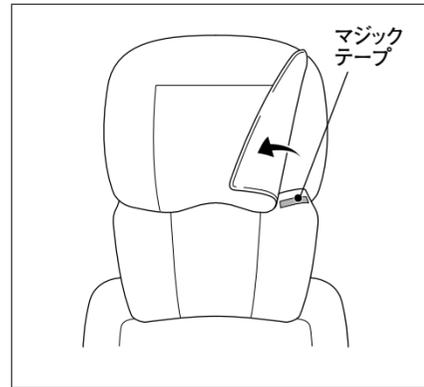

③背エアースルを裏返して、背エアースルと背もたれをつなぐファスナーをはずします。

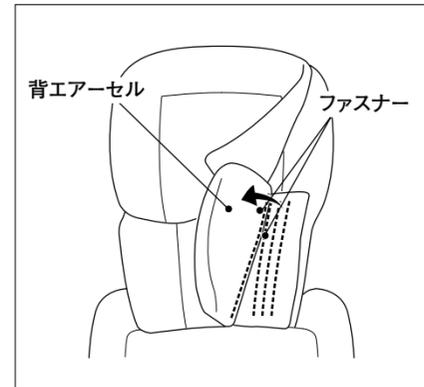

④背エアースルを背もたれからはずします。
※背エアースルは配管で椅子とつながっているため、椅子から分離することはできません。

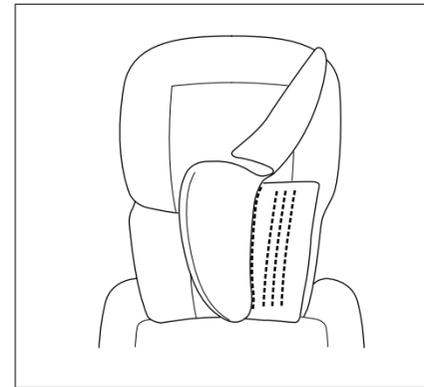

※左側も手順は同じです。
※取り付けは取りはずしの逆の手順で行います。

注意 ●背エアースルをはずしてマッサージしないでください。

リモコンのスピーカーについて

リモコンのスピーカーの音は扉内部の[消音]ボタンで「入」「切」を行うことができます。
「切」の状態のとき、リモコンの表示部に右図のイラストが表示されます。



オットマンの調節

角度調節の仕方

①角度調節レバーを外側に引き、②使い方に適した角度に調節してください。
角度は5段階に調節できます。
角度が合うとカチッと音がして固定されます。
※オットマンを持ち上げたときに角度調節レバーが動き、ロックが解除されないよう角度調節レバーは真横に引くようになっています。



警告

●角度調節レバーや可動部などの隙間に手や物をはさまないようにしてください。
●角度調節レバーを引いた状態で急に手を離さないでください。

注意

●オットマンはふくらはぎ、足裏、おしり以外には使用しないでください。



使用例

マッサージャーとして使う場合

●足裏をマッサージする

●ふくらはぎをマッサージする

●おしりをマッサージする
※オットマンによるおしりコース以外でおしりをマッサージしないでください。

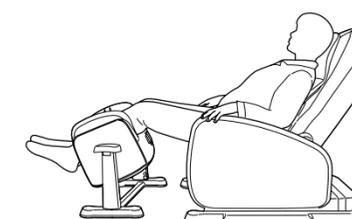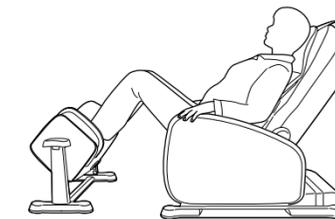

スツールとして使う場合



注意


●マッサージの前には必ず角度が固定されているか確認してください。
→転倒による事故やケガのおそれがあります。
●オットマンが倒れないように静かに脚をのせてください。
また、オットマンを強く蹴るように押さないでください。
●はじめは弱い刺激でマッサージしてください。角度を調節し、体調に応じた刺激でご使用ください。
●構造上やむを得ないがたつきがあるので、座る際には注意してください。

指圧パッドの使い方


指圧パッドはサイドのエアースルにあるポケットに入れてお使いください。
ポケットは4箇所(左右2箇所ずつ)あります。
指圧パッドを入れるとマッサージの刺激がより強くなります。
お好みに合わせてお使いください。

注意

●はじめは指圧パッドを使わず、弱い刺激でマッサージしてください。
→はじめからマッサージの刺激を強くすると、ケガのおそれがあります。特に高齢者や骨が弱いと思われる方は、十分注意してマッサージしてください。

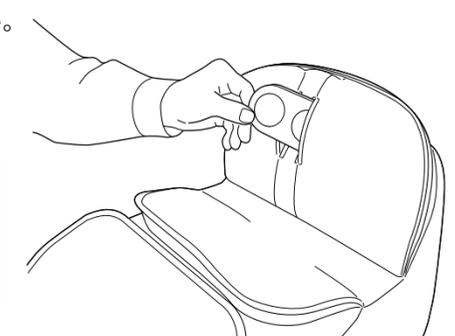

コースの種類と特長

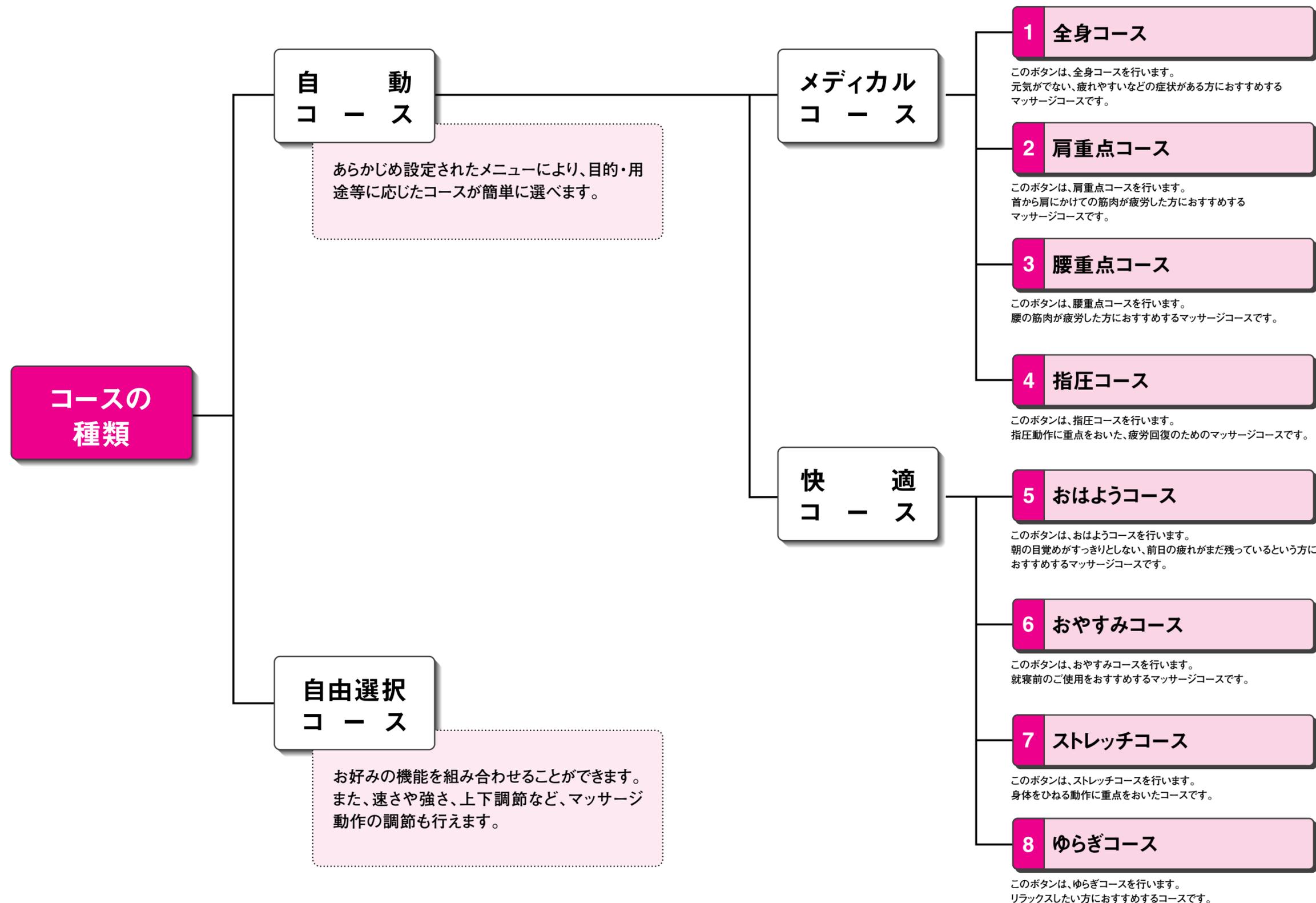

●各コースの時間は身長や体格、リクライニング角度などによって異なります。

【コースの種類と特長】


【コースの種類と特長】

自動コース

自動コースについて

- 目的に合わせた8種類のコースを用意しています。
- 各コースボタンでお好みのコースを選ぶことにより、あらかじめ設定されたメニューにもとづいて自動コースを行います。

各調節の方法

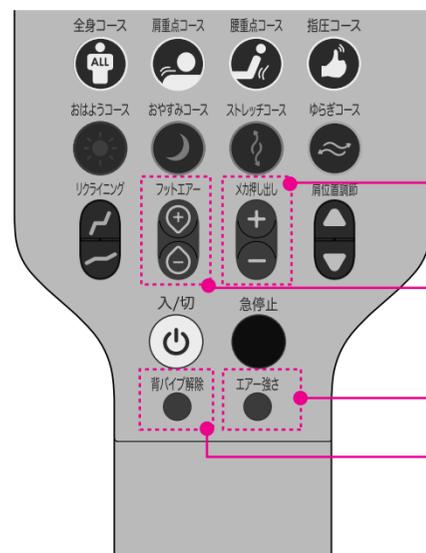

- **[メカ押し出し] ボタン**
背中のマッサージの強さを [+] [-] のボタンで無段階に調節できます。
- **[フットエア] ボタン**
オットマンのエアーマッサージの強さを [⊕] [⊖] のボタンでフットリップの角度を調節することにより、細かく調節できます。
- **[エアースタート] ボタン**
エアーマッサージの強さは、はじめは [中] に設定されています。ボタンを一度押すごとに、強⇒エアースタート⇒弱⇒中の順に切り換わります。
※ストレッチコース動作時は、エアースタートは行いません。
ボタンを一度押すごとに、強⇒弱⇒中の順に切り換わります。
※コースを切り換えると、エアースタートは初期設定の [中] になります。
- **[背パイプ解除] ボタン**
コース動作の中に含まれているパイプは、お好みにより [背パイプ解除] ボタンで解除できます。もう一度押すと再開します。

コース変更

コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り換えられます。ただし、コースの途中で、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

自動コース→自動コース

自動コース実行中に他の自動コースボタンを押すと、もみ玉が一度収納状態に戻り、再度自動指圧点検索動作から開始します。
※メカ押し出し用のエアースタートから空気を一度排気するため、場合によってはコース変更にかかることがあります。

自動コース→自由選択コース

自動コース実行中にリモコンの扉を開けて自由選択コースのボタンを押すと、押した時点で自動コースは中断して選択した動作を実行します。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に [入/切] ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。
緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止] ボタンを押してください。その場で動作が停止します。
安全確認後、[入/切] ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないようにしてください。また、髪飾りなどのかたい物をつけて本機を使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にマッサージ部から無理に脚を抜かないでください。また、脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。

自動コースの操作方法

1 [入/切] ボタンを押します。

5分間入力がなければ、自動的に電源が切れます。

2 お好きなコースのボタンを押します。

選択したコースをお知らせします。
※この後、指圧点検索を行います。


[お願い] 正確な指圧点を検索するため、必ず椅子に深く腰をかけ、頭を背もたれにあててください。

3 肩位置が調節できます。

[肩位置調節] ボタンでもみ玉を上下に調節できます。調節しなくてもよい場合はそのままにしておきます。


4 コースがはじまります。

コースの進み具合は、リモコン表示部にコース名と共に表示されます。

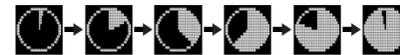

5 コースの終了

動作が終了し、もみ玉が収納位置（背もたれ上部）まで戻ります。

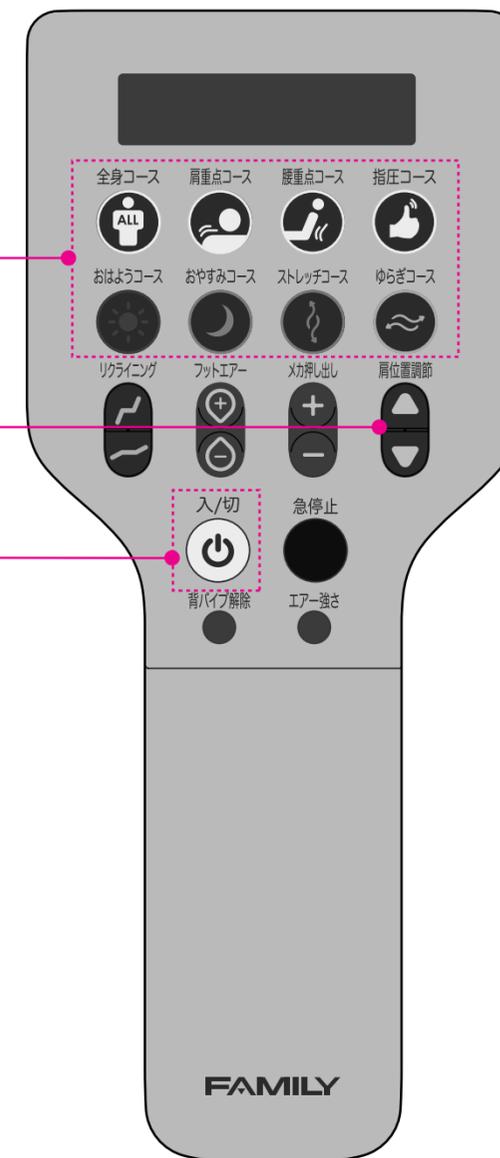

注意

- マッサージの使用は1回15分以内にしてください。同一箇所への連続してのご使用は5分以内にしてください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にしてください。

自由選択コース

自由選択コースの動作説明


- ①～⑤のメニューの中からそれぞれお好みの動作を選択し、組み合わせることができます。
- 実行中の動作調節が可能なものについては動作調節の欄に○印をつけています。
- 幅調節できない動作と、ローラーや背パイブを組み合わせた場合、幅調節はできません。
- ローラーでは自動コース時のように自動指圧点検索を行います。指圧点検索直後の肩位置調節はできません。

| ①基本動作 | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|-----------|-------|-------|-----|------|------|--|
| 動作 | ボタン | 内容 | 表示 | 正転/逆転 | 速さ調節 | 幅調節 | 上下調節 | 強さ調節 | |
| もみ | | もみ動作を行います。 ボタンを押すごとに正転⇒逆転⇒切と切り換えることができます。(P23参照) | | ○ | ○ 5段階 | — | ○ | ○ | |
| 手もみ | | 手もみ感覚に近い動作を行います。 ボタンを押すごとに正転⇒逆転⇒切と切り換えることができます。(P23参照) | | ○ | — | — | ○ | ○ | |
| たたき | | たたき動作を行います。 ボタンを一度押すごとにたたき1⇒たたき2⇒切と切り換えることができます。 | たたき1 | — | ○ 5段階 | ○ | ○ | ○ | |
| | | | たたき2 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
| もみ & たたき | | もみとたたきを同時に行います。 もみ(正・逆)とたたき(1・2)による組み合わせになります。 | もみ & たたき1 | ○ | ○ 5段階 | — | ○ | ○ | |
| | | | もみ & たたき2 | ○ | — | — | ○ | ○ | |
| 指圧 | | 指圧動作をリズムカルに繰り返します。 ボタンを一度押すごとに指圧1⇒指圧2⇒切と切り換えることができます。 | 指圧1 | — | — | ○ | ○ | ○ | |
| | | | 指圧2 | — | — | — | ○ | ○ | |

| ②パイブレーション | | | | | |
|---|-----|----|-----|------|------|
| 背のパイブレーションマッサージを行います。(一定の間隔で動作・停止をくり返します。) ボタンを一度押すごとに、弱⇒中⇒強⇒切と切り換えることができます。 | | | | | |
| 動作 | ボタン | 表示 | 幅調節 | 上下調節 | 強さ調節 |
| 背パイブ | | | ○ | ○ | ○ |
| 内容 背中のパイブレーションマッサージを行います。 (上図の場合はパイブ強さ「強」) | | | | | |

| ③エアーマッサージ | | | | |
|--|-----|----|---|------|
| 動作中でも、[エアー強さ] ボタンでマッサージの強さを調節できます。 | | | | |
| 動作 | ボタン | 表示 | 内容 | 強さ調節 |
| ふくらはぎ 足裏 | | | ふくらはぎと足裏のエアーマッサージを行います。 ボタンを一度押すごとにふくらはぎ⇒足裏⇒切と切り換えることができます。 (左上図の場合はエアー強さ「強」、 左下図の場合はエアー強さ「弱」) | ○ |
| ※オットマンの角度は調節することができます。(P16参照) ※オットマンによるマッサージはオットマンの操作器でも操作することができます。(P25参照) | | | | |

| ④ローラー | | | | | |
|---|-----|----|---|-----|------|
| 自動コース時のように自動指圧点検索を行います。指圧点検索直後の肩位置調節はできません。 | | | | | |
| 動作 | ボタン | 表示 | 内容 | 幅調節 | 上下調節 |
| 背筋ローラー 部分ローラー | | | 上下運動のみで背筋のばし、部分背筋のばしを行います。 ボタンを一度押すごとに背筋ローラー⇒部分ローラー⇒切と切り換えることができます。 ※部分ローラー時は部分ローラー範囲の中心位置の調節となり、背筋ローラー時は上昇・下降の入れ換えとなります。 | ○ | ○* |

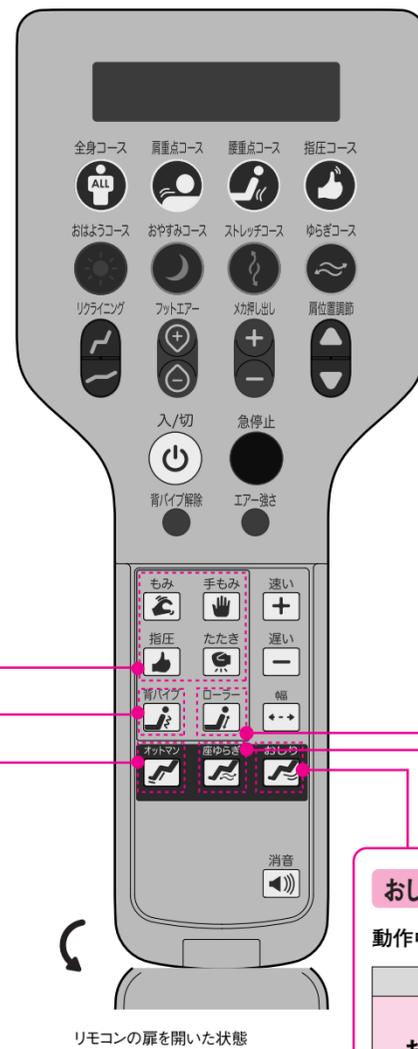

リモコンの扉を開いた状態

| ⑤ゆらぎ | | | |
|------|-----|----|---------------------------------------|
| 動作 | ボタン | 表示 | 内容 |
| 座ゆらぎ | | | 座部のゆらぎを行います。 動作中にボタンを押すと、動作が停止します。 |

| おしりモード (このメニューは他のメニューと組み合わせることはできません。) | | | |
|--|-----|--|------|
| 動作中でも、[エアー強さ] ボタンでマッサージの強さを調節できます。 | | | |
| 動作 | ボタン | 内容 | 強さ調節 |
| おしりモード | | エアーマッサージ・パイブレーション・ローラー・もみ・たたきを組み合わせて、腰からおしりにかけてマッサージを行います。 | ○ |
| 途中で終了する場合は、[入/切] ボタンを押してください。 収納動作を行なった後で停止します。 | | | |

自由選択コース

各調節の方法

■正転/逆転の切り換え

| 動作 | 表示 | 内容 |
|----|----|--|
| 正転 | | もみ・手もみ・もみ&たたき1/2は、ボタンを一度押すごとに正転⇒逆転⇒切と切り換えることができます。 |
| 逆転 | | |

■[メカ押し出し] ボタン

| 動作 | ボタン | 内容 |
|------|-----|--------------------------------------|
| 強さ調節 | | 背中でのマッサージの強さを[+] [-]のボタンで無段階に調節できます。 |

■[肩位置調節] ボタン

| 動作 | ボタン | 内容 |
|------|-----|---|
| 上下調節 | | もみ・手もみ・もみ&たたき1/2・指圧1/2・たたき1/2・部分ローラー・背パイプの動作中、[▲] [▼] ボタンの操作でマッサージしたいところにもみ玉の位置を調節できます。 |

※部分ローラーは、部分ローラー範囲の中心位置が調節できます。背筋ローラー使用時に上下調節ボタンを押した場合、上昇・下降が入れ替わります。

■[フットエア] ボタン

| 動作 | ボタン | 内容 |
|----------|-----|---|
| フットエア微調節 | | オットマンのエアーマッサージの強さを[+] [-] ボタンでフットフリップの角度を調節することにより、細かく調節できます。 |

■[エア-強さ] ボタン

おしりモード・オットマンでのエアーマッサージの強さを調節します。エアーマッサージの強さは、はじめは[中]に設定されています。おしりモード時はボタンを一度押すごとに強⇒エア-解除⇒弱⇒中の順に切り換わります。オットマンでのマッサージ時はボタンを一度押すごとに強⇒弱⇒中の順に切り換わります。

■[速さ] ボタン


| 動作 | ボタン | 表示 | 内容 |
|------|-----|----|---|
| 速さ調節 | | | もみ、もみ&たたき1、たたき1の動作中に、マッサージの速さを[+] [-]のボタンで5段階に調節できます。動作中にも速度を変えることができます。表示は、速さ4に設定した場合です。 |

■[幅] ボタン

指圧1・たたき1/2・背筋ローラー・部分ローラー・背パイプの動作中に、もみ玉の幅を「狭」「中」「広」の3段階に調節できます。動作中にも幅を変更することができます。※ただし、幅調節できない動作(もみ・手もみ・もみ&たたき1/2・指圧2)とローラーや背パイプを組み合わせた場合は幅調節はできません。

| 動作 | ボタン | 表示 |
|-----|-----|----|
| 幅調節 | | |
| | | |
| | | |

自由選択コースの操作方法

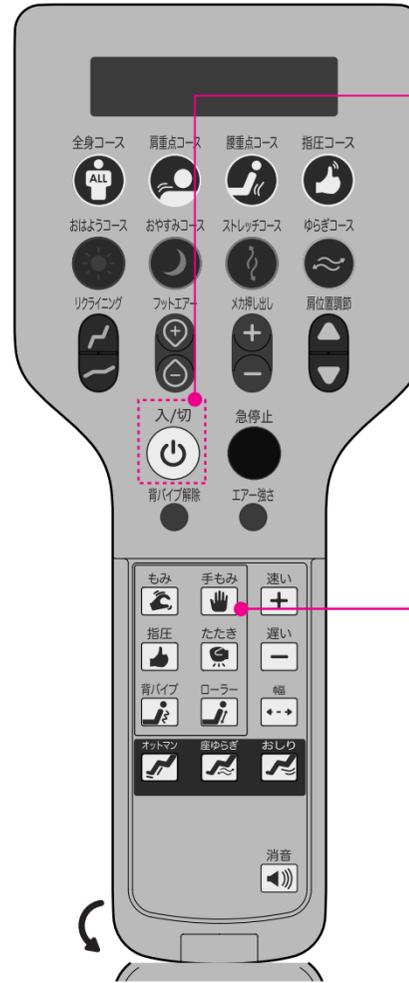

1 [入/切] ボタンを押します。
リモコンの扉を開けると、自由選択コースのメニューが選べる状態になります。5分間入力がないと自動的に電源が切れます。

2 お好きな動作のボタンを押します。

3 15分経過すると動作が終了します。
もみ玉が収納位置(背もたれ上部)まで戻ります。

4 動作が停止します。

コース変更

自由選択コース→自動コース

自由選択コース実行中に自動コースのボタンを押すと、もみ玉が一度、収納状態に戻り、自動指圧点検索動作から開始し、自動コースを行います。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。※メカ押し出し用のエア-バッグから空気を一度排気するため、場合によってはコース変更に時間がかかることがあります。

コースの途中終了

途中で終了する場合は、動作中に[入/切] ボタンを押せば、収納動作を行なった後で停止します。緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止] ボタンを押せば、その場で動作が停止します。安全確認後、[入/切] ボタンを押してください。収納動作を行なった後で停止します。

注意

- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。
- もみ玉が上下する部分や、背もたれと座のすき間や可動部に手や足を入れないでください。また、髪飾りなどのかたい物をつけて本機を使用しないでください。
- 脚部のマッサージ中にマッサージ部から無理に脚を抜かないでください。また、脚が抜けた場合、無理に脚を入れないでください。

オットマンマッサージ

オットマンマッサージについて

●下半身のマッサージを目的とした3種類のコースを用意しています。

1 ふくらはぎコース

「つかんでは離す」という圧迫・開放を繰り返し、筋肉の疲労回復を促すマッサージコースです。


2 足裏コース

エアースセルが上下からつつみ込むように、じっくりともみほぐすマッサージコースです。

3 おしりコース

サイドからエアースセルが、おしりをはさみ込み、心地よい刺激を与えるマッサージコースです。

操作器での動作の調節

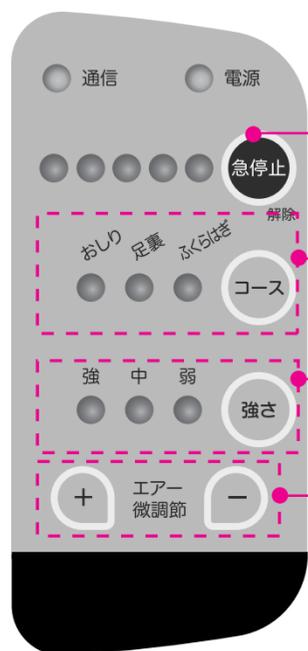

■コース途中終了

緊急時や動作中に異常を感じたときは、[急停止] ボタンを押してください。マッサージ部のエアが抜けた後で停止します。コースを再開する場合はもう一度[急停止] ボタンを押して、その後マッサージコースのボタンを押してください。終了する場合は、安全確認後、主電源スイッチを「OFF」にしてください。

■コース選択・コース変更

コースボタンで3つのコースを選択できます。選択したコースのランプが点灯します。また、コース終了まで待つことなく、動作中に他のコースに切り換えられます。ただし、コースの途中でも、30分経つとマッサージは一度終了するようになっています。

■エアーマッサージの強さ調節

エアーマッサージの強さは、はじめは「中」に設定されていますが、お好みに応じて[エアー強さ] ボタンで弱・中・強の3段階に調節ができます。選択した強さのランプが点灯します。

■エアー微調節

エアの強さは[エアー強さ] ボタンで調節できますが、[エアー微調節] ボタンでフットフリップの角度を調節することにより、さらに細かく調節をすることができます。

■マッサージを強くする場合

[+]を押してください。フットフリップが内側に倒れ、マッサージの刺激が強くなります。

■マッサージを弱くする場合

[-]を押してください。フットフリップが外側に広がり、マッサージの刺激が弱くなります。

⚠ 注意

- マッサージは1回15分以内に行ってください。
→長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やケガの原因になります。
1日当たりのマッサージは通算して30分程度を目安にして時間をあけてご使用ください。
- 脚部のマッサージ中にマッサージ部から無理に脚を抜かないでください。また、脚が抜けた場合、無理に脚を入れしないでください。
- マッサージの刺激が強いと感じたときは、この取扱説明書にしたがい刺激を弱くしてください。それでも強いと感じるときは、使用を中止しサービスセンター（裏表紙に記載）にご相談ください。
→強い刺激のまま使用を続けるとケガのおそれがあります。

故障かな?と思ったら

サービスマン以外の人は、分解や修理をしないでください。

次の点検をしていただき、それでもなお異常のあるときは、事故防止のためただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）までご相談ください。

| | |
|--------|--|
| 状態 | 動作時の音 ●たたき動作と、もみ&たたき動作時の音（ゴトゴト音） ●エアポンプの音（ブーン音） ●もみ動作時のもみ玉と布のすれる音、ゆらぎ動作時の布のすれる音（キュッキュッ、ギューギュー音） ●ゆらぎ動作時の音（コクンコクン音） ●パイプレーター音（ブーンブーン音） ●リクライニング時の音（ウィーン音） ●エアーマッサージ中の音（コツコツ音） |
| 原因と直し方 | 構造上やむを得ず発生するもので、性能等に影響はありません。 |
| 状態 | リモコンのボタンを押しても正常に動作しない。 |
| 原因と直し方 | 次の点検を行ってください。 ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。 ②コネクタが椅子後部のインレットに確実に差し込まれているか確認してください。 ③椅子後部の主電源スイッチは「ON」になっているか確認してください。 ④リモコンの扉がしっかりと閉められているか確認してください。 |
| 状態 | オットマンの操作器のボタンを押しても正常に動作しない。 |
| 原因と直し方 | 次の点検を行ってください。 ①電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。 ②脚フレーム内側の主電源スイッチが「ON」になっているか確認してください。 （主電源スイッチが「ON」のとき、操作器の電源ランプが点灯します。） |
| 状態 | 表示部に「主電源を入れ直してください」という表示が出た。 |
| 原因と直し方 | 椅子後部の主電源スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてから主電源スイッチを再度入れ直してください。 ①正常に戻ればそのままお使いください。 ②再度、同じメッセージが表示される場合は、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター（裏表紙に記載）に連絡してください。 |
| 状態 | 自動指圧点検索がうまくいかない。（もみ玉が肩の高さに合っていない。） |
| 原因と直し方 | 椅子に深く腰をかけて頭を背もたれにあててください。また、自動コース動作時は指圧点検索直後に肩位置調節ボタンで肩位置を調節できます。（背筋ローラー、部分ローラー以外の自由選択コースでは自動指圧点検索機能は働きません。） |
| 状態 | マッサージ動作が途中で止まる。 |
| 原因と直し方 | 椅子とオットマンの主電源スイッチを「OFF」にし、5秒ほどしてから主電源スイッチを入れ直してください。 ①正常に戻ればそのままお使いください。 ②正常に戻らない場合は事故防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、サービスセンター（裏表紙に記載）に連絡してください。 |
| 状態 | マッサージ中に、もみ玉が途中で止まる。 |
| 原因と直し方 | 速度を遅くして、もみ玉に必要な以上の力が加わると、動きが止まることがあります。故障ではありません。体を浮かせぎみにしてください。 |


故障かな?と思ったら サービスマン以外の人は、分解や修理をしないでください。

状態 もみ玉が上部へ移動して止まってしまった。

原因と直し方 オートタイマー機能によりマッサージ終了時に、もみ玉が体に干渉しないように上部へ移動する構造になっています。続けてマッサージを行う場合は、もう一度リモコンの[入/切]ボタンを押してください。

状態 左右のもみ玉の位置がずれている。

原因と直し方 交互たたき機構を採用しているため、構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。

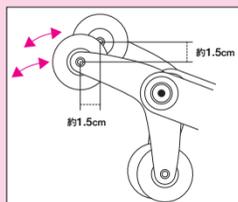

状態 リクライニングができない。

原因と直し方 背もたれと制御ボックスの間に何か物がはさまっていないか確認してください。リクライニング安全装置が作動している可能性があります。

状態 エアーマッサージ中、リクライニングさせるとエアーマッサージが止まってしまう。

原因と直し方 安全のため、背もたれの角度調節中はエアーマッサージが止まるようになっています。故障ではありません。

状態 エアーマッサージ中、[メカ押し出し]ボタンの[+]のボタンを押すとエアーマッサージが止まってしまう。

原因と直し方 構造上やむを得ず発生するもので故障ではありません。

状態 オットマンのエアーマッサージが動かない。

原因と直し方 次の点検を行ってください。
① 椅子とオットマンの間に何か物がないか確認してください。
② 椅子の赤外線送信部とオットマンの赤外線受信部が向かい合っているか確認してください。椅子から発信されている赤外線をオットマンが受信できていない可能性があります。オットマンの操作器の通信ランプが点灯するようにしてください。

状態 オットマンのエアーマッサージが、リモコンの[入/切]ボタンまたは[急停止]ボタンを押しても停止しない。

原因と直し方 オットマンの操作器の[急停止]ボタンを押してください。その後、次の点検を行ってください。
① 椅子とオットマンの間に何か物がないか確認してください。
② 椅子の赤外線送信部とオットマンの赤外線受信部が向かい合っているか確認してください。椅子から発信されている赤外線をオットマンが受信できていない可能性があります。オットマンの操作器の通信ランプが点灯するようにしてください。

状態 オットマンの角度調節ができない。

原因と直し方 角度調節レバーや可動部などの隙間に何か物がはさまっていないか確認してください。

Q&A

Q マッサージをより強くするにはどうすればいいですか?

A **椅子の場合**
リモコンの[メカ押し出し]ボタン、[エア-強さ]ボタン、[背パイプ]ボタンでマッサージの刺激を調節してください。それでも弱いときは背もたれを倒し、深く腰をかけ、背もたれに体重がかかるようにしてください。背パッド裏の緩衝パッドを同梱の緩衝パッド(薄)に入れ換えるか、緩衝パッドを抜き取ってマッサージをしても刺激を強くすることができます。

A **オットマンの場合**
リモコンまたはオットマンの操作器の[エア-強さ]ボタンでマッサージの刺激を調節してください。リモコンの[フットエア-]ボタン、またはオットマンの操作器の[エア-微調節]ボタンでフットフリップを動かしてさらに細かく調節することもできます。

Q マッサージをより弱くするにはどうすればいいですか?

A **椅子の場合**
リモコンの[メカ押し出し]ボタン、[エア-強さ]ボタン、[背パイプ]ボタンでマッサージの刺激を調節してください。背もたれを起こして使用してもマッサージの刺激を弱くすることができます。

A **オットマンの場合**
リモコンまたはオットマンの操作器の[エア-強さ]ボタンでマッサージの刺激を調節してください。リモコンの[フットエア-]ボタン、またはオットマンの操作器の[エア-微調節]ボタンでフットフリップを動かしてさらに細かく調節することもできます。

Q 誤って水をかけてしまった。どうすればいいですか?

A ただちに主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店またはお近くのサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。

Q 体重が重くてもだいじょうぶですか?

A 体重100kgまでの方のご使用を推奨しております。体重100kg以上の方がご使用になる場合は、少し体を浮かせぎみにしてご使用ください。

Q 電気代はいくらぐらいかかりますか?

A 1日15分、毎日ご使用いただいた場合、1ヵ月で約29円です。(2007年5月現在、当社調べ)

使い終わったら

⚠ 注意

- 使用後は必ず主電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
→ お子様やペットのイタズラ等による事故やケガのおそれがあります。
- 使用後は、必ず背もたれを完全に起こしてください。
- 使用後は汚れを取り、湿気の少ないところに保管してください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
- ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

保管とお手入れの仕方

保管の仕方

- 汚れやホコリをとった後、湿気の少ない場所に保管してください。
- ご使用にならない時は、カバーなどをかけ、ホコリがつかないようにしてください。
- ペットがコードをかむこと等を防止するため、保管中も本機の周辺にペットを近づけないようにしてください。

注意 ●直射日光が当たる場所や、ストーブの近くなど直接高温になる場所には設置しないでください。

お手入れの仕方

注意 ●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。

【背パッド・枕・各カバーのお手入れ】

汚れがついたときは、少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取ってください。

注意 ●ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させると、変色の原因となります。

【リモコン・操作器・制御ボックスのお手入れ】

リモコン・操作器・制御ボックスについて汚れは、乾いた布で拭き取ってください。

- 絶対にぬれたタオルなどで拭かないでください。→故障の原因になります。

【その他のプラスチックのお手入れ】

少量の中性洗剤を溶かしたぬるま湯に柔らかい布をひたし、かたくしぼってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。

- アルコール、その他の溶剤やみがき粉などのお手入れは傷、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。


枕・背パッドの取りはずし方

枕・背パッドを取りはずすときは以下の方法で行ってください。

※取り付けは取りはずしの逆の手順で行います。

①枕と背もたれ用カバーを固定しているマジックテープをはがして、枕を取りはずします。

②背パッドと本体をつなぐファスナーをはずして、背パッドを取りはずします。

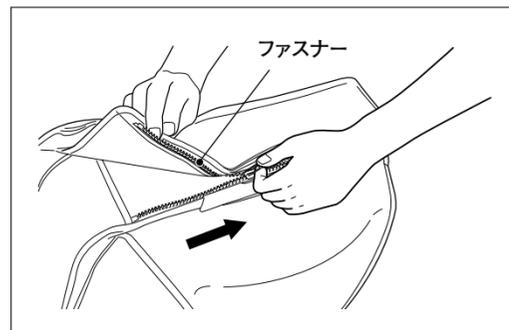

アフターサービスについて

1.保証書について

この製品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店にて「販売店・購入日」などの所定事項を記入してお渡ししていますので、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。（修理の際、必要となります。）保証期間は、お買い上げ日より1年間です。ただし、この製品は日本国内専用ですので、日本国外でご使用になられた場合は、保証期間中でも保証書は無効となります。また、一般家庭以外（業務用など）でご使用の場合は、保証期間中でも有料修理とさせていただきます。

2.修理を依頼される時

修理を依頼される前に、26～27ページの「故障かな?と思ったら」をよくお読みください。点検後、まだ異常がありましたらお買い上げの販売店へ次のことをご連絡の上、ご依頼ください。

- 1) お名前・ご住所・お電話番号
- 2) 販売名…この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。
- 3) 製造番号…椅子後部の制御ボックスに貼ってある社銘板をご覧ください。
- 4) お買い上げ日
- 5) 故障の状態（できるだけ詳しくお知らせください。）

- 保証期間中は
修理の際、保証書をご提示ください。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間が過ぎている場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にできない場合は
サービスセンター（裏表紙に記載）にご連絡ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社はこの電気マッサージ器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。（ただし、縫製部品は除きます。）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は
お買い上げの販売店、またはサービスセンター（裏表紙に記載）にお問い合わせください。
- 日本国外でご使用になられた場合、修理をお断りする場合があります。

安全のために商品の点検を

長期ご使用の場合は商品の点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても、動作しないときがある。
- 電源コードに“ひび割れ”や“傷”がある。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- コゲくさいにおいがしたり、動作中に異常な音や振動がする。
- 自動的にタイマーが切れないときがある。
- その他の異常や故障がある。

上記のような症状があれば、故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

安全にお使いいただくために

椅子の布地（もみ布）は消耗品であり、耐用年数は3年です（使用条件：1日15分コースを2回、毎日使用した場合）。安全にお使いいただくために、お買い上げ後、耐用年数が過ぎる前にお買い上げの販売店、またはサービスセンターでの定期点検をおすすめします。

※ただし使用条件が上記と異なる場合には、耐用年数が変わります。

※お買い上げ後5年ほど経ちましたら、安全のために機器の点検をおすすめします。

点検・修理に要する費用につきましては、お買い上げの販売店、またはサービスセンターにご相談ください。

愛情点検

